



Patiënt identificatie kaart

Codman[®] Hakim[®]

Programmeerbare klep

Bij noodgevallen of
medische behandeling,
toon deze **Patiënt identificatie kaart** !

Patiëntgegevens

PATIËNTGEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Plaats

Straat

Land

Telefoon

NOODCONTACT

Voornaam

Achternaam

Telefoon

Implantatie-informatie

IMPLANTAAT

Implantatiedatum

Ziekenhuis van implantatie

Telefoon van ziekenhuis

Naam van arts

Telefoon van arts

Medische omstandigheden

KLEP PLAATSING

Frontaal

Occipitaal

Productinformatie

PROGRAMMEERBARE KLEP

De Codman® Hakim® programmeerbare klep heeft 18 drukinstellingen.

Productcode



Serienummer

- | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cilindrisch | <input type="checkbox"/> Normaal | <input type="checkbox"/> Micro |
| <input type="checkbox"/> Micro boorgat | <input type="checkbox"/> Normaal boorgat | |

WAARSCHUWING

- Gebruik alleen de Codman® Hakim® programmator of het VPV® Systeem voor aanpassing en instellingsaanwijzing van de Codman® Hakim® programmeerbare klep.
- Het gebruik van MRI systemen (t/m 3 Tesla) zal het klepmechanisme niet beschadigen maar kan de werkingsdruk van de klep wijzigen. Na een MRI procedure, moet de arts de drukinstelling bevestigen en de klep herprogrammeren indien nodig.
- De instelling van de klep wordt aangepast door toepassing en manipulatie van sterke magneten. Een verandering van de instelling van de klep is onwaarschijnlijk in normale omstandigheden. Er mogen echter geen magnetische velden dichtbij de klep gebracht worden wegens de mogelijkheid van onbedoelde verandering van de instelling.
- Bij de volgende of andere symptomen, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen: hoofdpijn, braken, slaperigheid, slapheid, irriteerbaarheid of veranderde mentale toestand.

Productinformatie

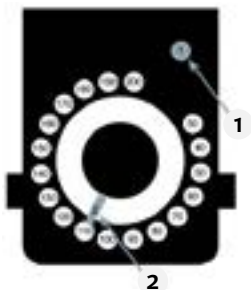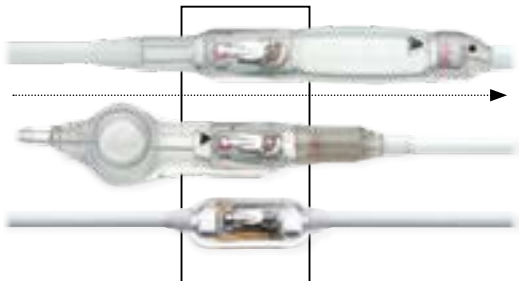

- 1 Draai het laterale schermbeeld zodat etiket 1 in de stand van 1 uur zit
- 2 Lees de stand van het etiket af volgens het schema (het voorbeeld toont aanpassing 110)

Gegevens na de procedure

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

Gegevens na de procedure

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

GEGEVENS NA DE PROCEDURE

Datum

Drukinstelling

Aantekeningen van arts

De drager van deze Patiënt Identificatiekaart heeft een geïmplanteerd drainsysteem wegens hydrocefalie voor de afvoer van hersenvocht.

In geval van lethargie, slaperigheid, verwardheid, flauwvallen, duizeligheid, epileptische aanval, een stijve nek, koorts van onbepaalde oorzaak, schade aan operatiehechtingen, kneuzing of huidbeschadigingen rondom de operatieplek of blootgestelde drainelementen, **neem onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis.**

Indicaties

De Codman® Hakim® programmeerbare kleppen zijn implanteerbare hulpmiddelen die voor constante intraventriculaire druk en de afvoer van CSV zorgen ter behandeling van hydrocefalie.

Contra-indicaties

De Codman® Hakim® programmeerbare klepsystemen uit één stuk worden niet aanbevolen voor atriale plaatsing. Gebruik de versies met afzonderlijke katheters voor deze procedure. Deze hulpmiddelen worden niet aanbevolen voor patiënten die antistollingsmiddelen krijgen of bekende neiging tot bloedingen hebben. Voorkom de implantatie van de shunt als in het lichaam een infectie aanwezig is. Stel de shuntprocedure uit bij aanwezigheid van infecties zoals meningitis, ventriculitis, peritonitis, bacteriëmie en sepsis.

Voor meer informatie, neem contact op met:

+32 (0)2 257 4130

+32 (0)2 253 2466 (fax)

custsvcbenelux@integralife.com



Integra LifeSciences Switzerland Sarl
Rue Girardet 29 (2nd Floor)
Le Locle ■ Neuchâtel CH-2400
Switzerland

Verkoop & Marketing EMEA

Integra LifeSciences Services (France) SAS

Immeuble Séquoia 2 97 allée A. Borodine

Parc Technologique de la Porte des Alpes

69800 Saint Priest - FRANKRIJK

Telefoon: +33(0)4 37 47 00 00

Fax: +33(0)4 37 47 99 00

Codman, Integra en het Integra logo zijn geregistreerde handelsmerken van Integra LifeSciences Corporation of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Hakim is een geregistreerd handelsmerk van Hakim USA, LLC en wordt onder licentie gebruikt. ©2020 Integra LifeSciences Corporation. Alle rechten voorbehouden. Laatste herzieningsdatum: 05/2020. 1077914-3-NL



Codman
SPECIALTY SURGICAL